

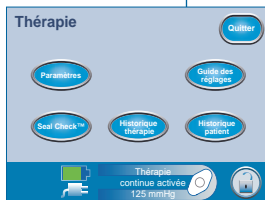
Conçu pour le traitement optimal des plaies

THE V.A.C.[®]
VACUUM ASSISTED CLOSURE[®]



EN QUOI L'HISTORIQUE THERAPIE ET PATIENT PEUT-IL VOUS ETRE UTILE ?

Afin d'avoir au jour le jour une évaluation clinique optimale, il est primordial d'avoir un accès rapide à un dossier exhaustif et détaillé du traitement et de l'évolution de la thérapie. La nouvelle fonction Historique thérapie et patient vous fournit ces informations en toute clarté.

**QUELS SONT LES ATOUTS APPORTÉS PAR L'HISTORIQUE PATIENT ?**

- Historique automatisé et détaillé de la thérapie, de ses réglages, de sa durée, et des alarmes.
- Dossier sur le traitement de la plaie et l'évolution de la thérapie offrant un suivi et des informations qui garantissent un ajustement rapide de la thérapie pour des résultats optimaux.
- Possibilité d'enregistrer le nombre de pièces de mousse utilisées, les derniers changements de pansement et les événements imprévus.

COMMENT FONCTIONNE LA FONCTION HISTORIQUE PATIENT ?

L'unité de thérapie consigne automatiquement les détails de la thérapie, notamment les réglages, la durée et les alarmes, par ordre chronologique (date et heure). Ces informations peuvent être consultées sur l'écran tactile, mais peuvent aussi être téléchargées.

De plus, un registre spécifique au patient peut être créé, avec les informations utiles sur la plaie, la thérapie, l'observance du patient et d'autres informations pertinentes.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Comment m'assurer que les informations sur le patient mémorisées dans l'appareil ne seront pas accessibles au personnel non autorisé ?

Les informations concernant les antécédents du patient sont protégées par mot de passe. Les cliniciens peuvent appuyer sur le bouton "Supprimer les antécédents" pour effacer totalement les données une fois la thérapie terminée. Si cette action n'a pas été effectuée au moment de l'enlèvement de l'unité, les informations sont automatiquement effacées pendant la procédure de contrôle qualité lors de la maintenance. L'équipe technique de KCI n'a PAS accès aux données protégées par mot de passe.

Comment enregistrer l'historique thérapie et patient pour un usage ultérieur ?

L'historique thérapie et patient peut être transféré à l'aide d'une carte mémoire SD ou d'une clé USB.

Pour obtenir des informations détaillées sur le mode d'utilisation de la fonction historique thérapie et patient, consultez le manuel d'utilisation de l'unité V.A.C.®.